

Aplicación y Cuidado Rutinario en...

6 sencillos pasos


1. Prepare la piel

Piel seca, libre de humedad y residuos grasos (USE ÚNICAMENTE UNA GASA SECA).

2. Retire los protectores de adhesivo


Retire los protectores de adhesivo de las dos mejilleras.

3. Coloque el dispositivo

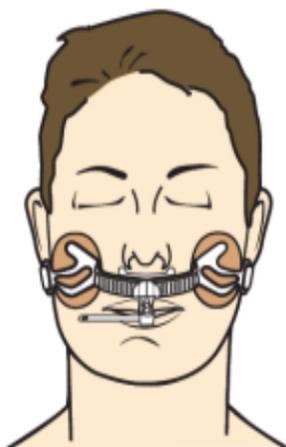


- La bigotera no absorbente apenas debe tocar la piel del paciente.
- Presione las mejilleras 30 segundos para mejorar la adhesión.

4. Ajuste la banda alrededor del cuello

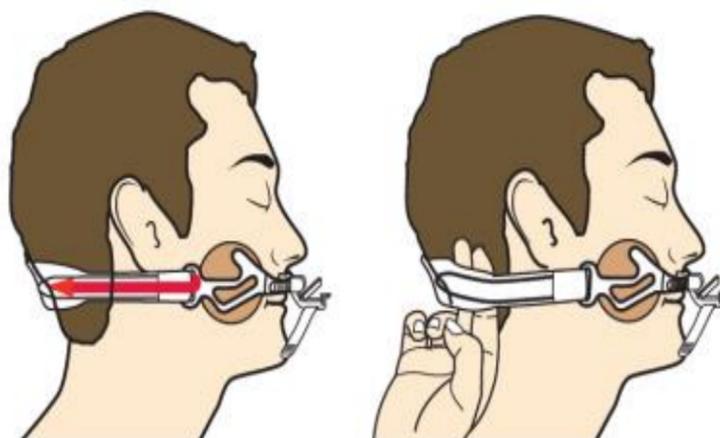


No ajuste demasiado. Deje un espacio de dos dedos entre la banda y la nuca.

5. Asegure el tubo endotraqueal

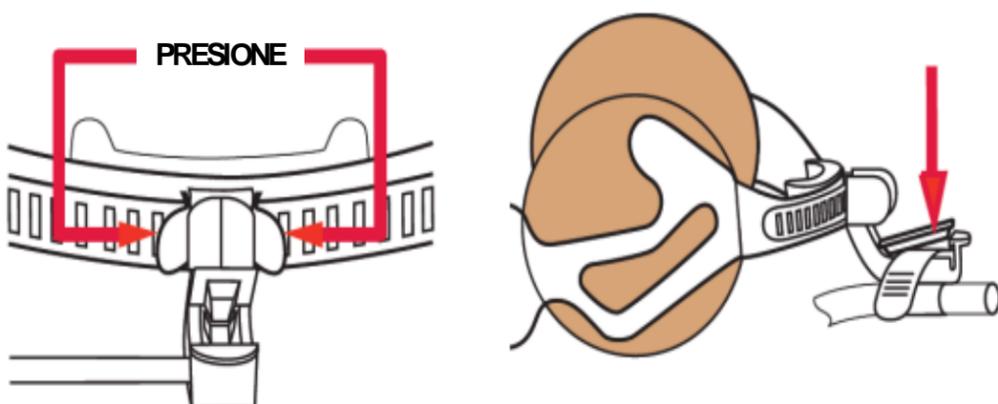

- Presione las lengüetas y deslice el estabilizador por encima del TE.
- Abraze el TE con la correa autoadherible.
- Cierre la pinza.

6. Cuidado Rutinario.

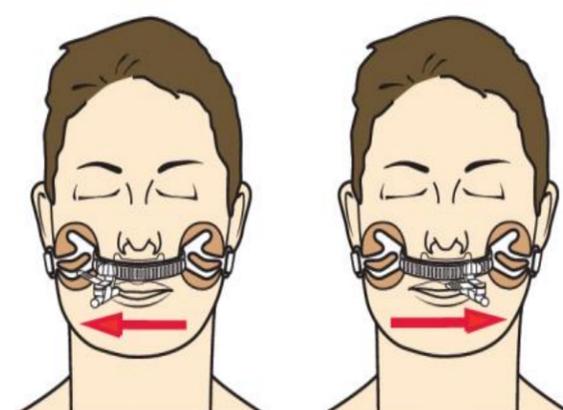

Deslice el estabilizador en la dirección deseada, REPOSICIONE cada 2 horas o de acuerdo a la normatividad vigente.

PRECAUCIONES. Para más detalles, asegúrese de leer las Instrucciones de Uso previo a su colocación. Anchor Fast® no está diseñado para ser utilizado en: a) Pacientes pediátricos, b) Ausencia de dentadura superior, c) Paciente con heridas faciales extensas que impidan la adhesión del dispositivo. Siempre apéguese a la **NORMATIVIDAD** vigente. Este dispositivo es de uso único, **NO SE REUTILICE.**