



Colostomía

¿Qué es lo mejor para mí?

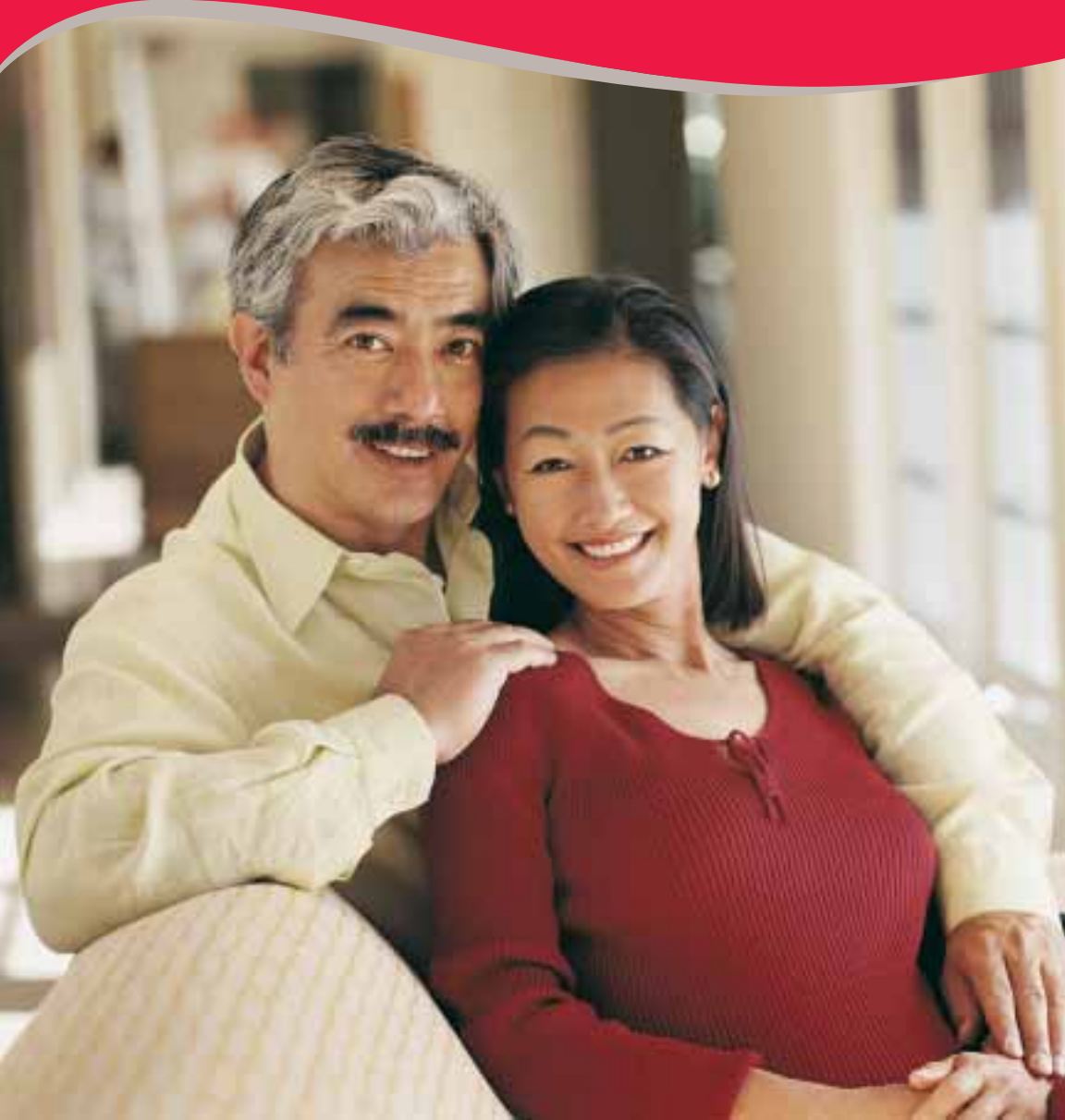

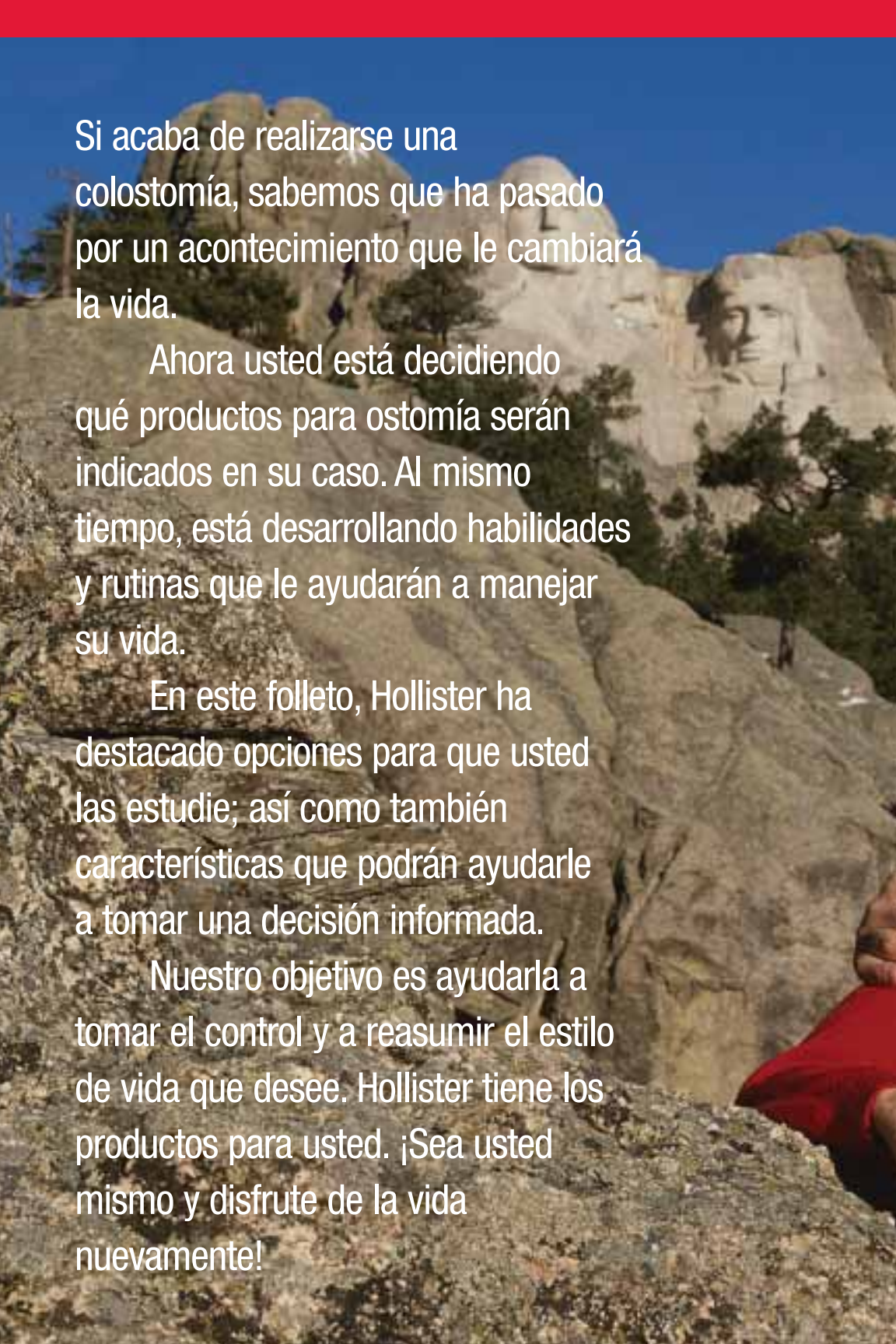

Si acaba de realizarse una colostomía, sabemos que ha pasado por un acontecimiento que le cambiará la vida.

Ahora usted está decidiendo qué productos para ostomía serán indicados en su caso. Al mismo tiempo, está desarrollando habilidades y rutinas que le ayudarán a manejar su vida.

En este folleto, Hollister ha destacado opciones para que usted las estudie; así como también características que podrán ayudarle a tomar una decisión informada.

Nuestro objetivo es ayudarla a tomar el control y a reasumir el estilo de vida que desee. Hollister tiene los productos para usted. ¡Sea usted mismo y disfrute de la vida nuevamente!



 Hollister

Acerca de su colostomía

Opciones de productos para colostomía

Si le han realizado una colostomía, o si usted es un profesional sanitario, podrá aprender nuevas habilidades y tomar muchas decisiones. Hay varios productos para ostomía entre los cuales elegir, y es posible que usted se sienta un tanto anonadado al principio. Esa es la razón por la cual Hollister diseñó este folleto; para responderle a sus preguntas y ayudarle a guiarse.

Cuando su alimento ha sido digerido por su estómago e intestino delgado, llega al colon o al intestino grueso. El colon (según se muestra a la izquierda) mide aproximadamente seis pies (1,8 m). En una **colostomía**, se saca o des via una porción del colon. La cantidad retirada depende del tipo de problema de salud que tenga.

El lugar donde se abre la colostomía en su piel, se llama el **estoma** u ostomía. El drenaje del estoma de su colostomía tendrá olor y contendrá gas. Si le eliminaron una gran parte del colon, puede que su descarga sea líquida o pastosa.

El estoma por lo general está rojo y húmedo, sangra con facilidad y no tiene sensibilidad. La piel junto a su estoma no debería tener erupciones ni llagas. Lo más importante que puede hacer para mantener su piel sana es usar productos para su ostomía que se adapten bien y se queden en su lugar.



El colon o intestino grueso (arriba).



En una colostomía (arriba) se saca o des via una porción del colon.



El estoma por lo general está rojo y húmedo, sangra con facilidad y no tiene sensibilidad.

El tamaño y la forma de su estoma



Cada estoma es ligeramente diferente en tamaño y forma. Es posible que su estoma se achique durante las primeras seis semanas después de la operación, por lo que es bueno medirlo con frecuencia. Mida su estoma después de que haya dejado de cambiar o si tiene problemas con la piel alrededor de su estoma.

Al elegir el tamaño de su barrera cutánea Hollister, elija una que se adapte bien alrededor de su estoma.

Tamaño predefinido (abajo, izquierda) - Si su estoma es redondo, es posible que usted opte por una barrera cutánea que ya esté cortada del tamaño adecuado.

Recortable a la medida (abajo, derecha) – Si su estoma no es redondo, médalo en la parte más ancha. Elija una barrera cutánea que pueda cortarse del tamaño y la forma adecuadas.



Sistemas de bolsas

¡Es su opción!

Tendrá varias opciones a medida que vaya descubriendo qué productos Hollister son los más adecuados para sus necesidades.

Puede elegir entre sistemas de bolsas Hollister de una y dos piezas. Cada uno tiene sus ventajas.

Sistema de una pieza

En un sistema de una pieza (izquierda) la barrera cutánea ya está unida a la bolsa. Esto significa que el sistema de una pieza es fácil de colocar. Simplemente despegue y pegue.



Sistema de dos piezas


El sistema de dos piezas (se muestra a la derecha) es el más versátil. Viene con una barrera cutánea que está separada de la bolsa. Las piezas se adhieren a presión con un **reborde**, una pieza similar a un anillo de plástico. Es fácil desprender la bolsa y desecharla todas las veces que quiera.



Sistema de dos piezas



Sistema de una pieza

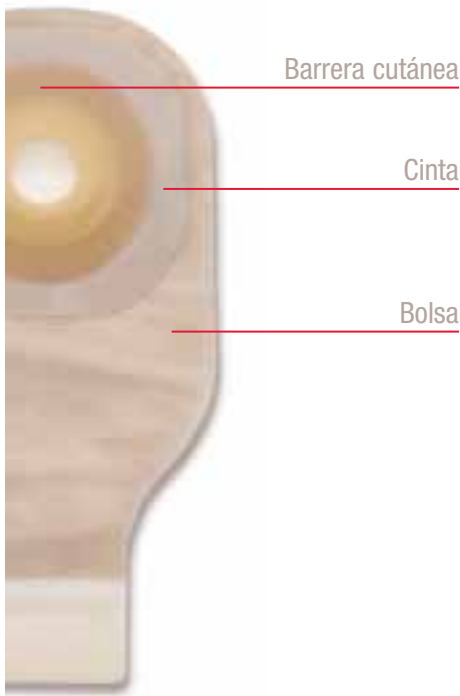

Con su sistema de dos piezas, puede usar un reborde flotante. Con un **reborde flotante**, puede colocar las yemas de los dedos debajo del reborde para sostener mientras une la bolsa a la barrera.

Su sistema de bolsa deberá ser seguro, sindor y cómodo, independientemente del tipo que elija. La barrera cutánea deberá cambiarse periódicamente, una o dos veces por semana.

El reborde flotante **New Image** proporciona un perfil más bajo y una apariencia más suave.



Con un reborde flotante, podrá colocar las yemas de sus dedos debajo del reborde.



El reborde flotante proporciona apoyo mientras une la bolsa a la barrera cutánea.

Bolsas para colostomía



Algunas bolsas drenables Premier tienen una pinza, por lo que el vaciado de la bolsa es rápido y fácil.

Puede elegir el tipo de bolsa para colostomía Hollister que desee usar. Los dos tipos principales son **drenable** o **cerrada**.

Varias de las bolsas presentan un modelo transparente y otro beige. También puede elegir bolsas que tengan una cubierta suave como el **revestimiento ComfortWear** de Hollister, para mayor comodidad.

Podrá elegir una bolsa con un **filtro** si su material de drenaje es mayormente esencialmente sólido. El filtro deja salir el gas, pero no el olor. También evita la acumulación de gas, por lo que la bolsa no se infla como un globo.

Todas las bolsas Hollister tienen la cualidad de **barrera para el olor**, a fin de aumentar su seguridad al usar la bolsa.

Bolsa drenable

Estas bolsas son mejores si usted tiene descargas frecuentemente a lo largo del día. Presentan ya sea el sistema de cierre Lock n' Roll (Cierre y enrolle) o vienen con una para bolsas independiente, para que el vaciado de la bolsa sea rápido y fácil.



Lock'n Roll (Cierre y enrolle). Los sujetadores de plástico de vanguardia traban y sujetan en su lugar. Simplemente enróllelos tres veces en la misma dirección, presione desde el medio hacia afuera y **sienta el sello**.





Bolsa cerrada

Si usa una bolsa cerrada, simplemente podrá quitársela botar la. Este tipo funciona mejor si su descarga es menos frecuente, y sólo necesita vaciar su bolsa una o dos veces por día. Las bolsas cerradas no tienen pinzas, y deben quitarse para ser vaciadas. Todas las bolsas cerradas de Hollister tienen un filtro.

New Image

Bolsas de dos piezas, cerradas y drenables



El filtro deja salir el gas
pero no el olor



Barreras cutáneas



Usted querrá el mejor entálle posible de su barrera cutánea. Las barreras cutáneas Hollister vienen con o sin cinta alrededor de los bordes. Ambos tipos se adhieren bien a su piel. Si su estoma sobresale al menos una pulgada (2,5 cm) de su cuerpo, es posible que se sienta más a gusto con una **barrera cutánea plana**. Si su estoma es plano al nivel de la piel o mide menos de una pulgada (2,5 cm) de largo, tenga en cuenta una **barrera cutánea convexa**.

La barrera convexa también le proporcionará un calce más seguro si tiene una zona hacia adentro irregular alrededor de su estoma.

Se recomiendan las **barreras cutáneas FlexWear, Flextend y SoftFlex** con colostomias.

Las barreras cutáneas FlexWear y Flextend están diseñadas para ser usadas durante más de un día. Las barreras cutáneas FlexWear y Flextend son resistentes a las roturas y son una buena opción si opta por cambiar su barrera una o dos veces por semana.

Si prefiere cambiar su barrera cutánea con mayor frecuencia, entonces puede que desee usar una barrera cutánea SoftFlex. Está diseñada para limitar el daño a la piel al ser retirada con frecuencia y puede cambiarla a diario (o más seguido).



Si su estoma sobresale al menos una pulgada (2,5 cm) de su cuerpo, es posible que se sienta más a gusto con una barrera cutánea plana.



Si su estoma es plano al nivel de la piel o mide menos de una pulgada (2,5 cm) de largo, tenga en cuenta una barrera cutánea convexa.

Guía para resolución de problemas

Tenga en cuenta

Su estoma es redondo y no cambia de tamaño	Barreras cutáneas con tamaño predefinido
Su estoma es ovalado o aún está cambiando de tamaño	Barreras cutáneas cortadas a medida
Su drenaje es líquido, suave o blando	Barreras cutáneas FlexWear o FlexTend
Su drenaje es más consistente o usted cambia su barrera cutánea con frecuencia	Barreras cutáneas SoftFlex
Desea algo muy fácil y flexible	Sistemas de bolsa de una pieza
Desea cambiar su bolsa con más frecuencia que su barrera cutánea	Sistemas de bolsa de dos piezas
Su descarga es poco frecuente (una o dos veces por día)	Bolsas cerradas
Su descarga es frecuente	Bolsas drenables
Su estoma sobresale, tiene un pliegue profundo o una hernia	Barreras cutáneas planas
Su estoma no sobresale, su piel está suave o tiene un leve pliegue en su piel	Barreras cutáneas convexas
Su descarga es más consistente y tiene gas	Bolsas con filtro
Quiere ver con facilidad el estoma o el contenido de la bolsa	Bolsas transparentes
No quiere ver el estoma ni el contenido de la bolsa	Bolsas beige
Desea mantener la bolsa alejada de su piel y aumentar la comodidad	Revestimientos ComfortWear
Usted desea tener un perfil bajo	Sistemas de bolsa de una pieza
Desea trabar los rebordes de las dos piezas sin tener que presionar su vientre	Rebordes flotantes
Usted es sensible a la cinta	Barreras cutáneas sin cinta
Usted quiere tener la seguridad de que no habrá olor cuando use su bolsa	Bolsa con barrera para el olor (todas las bolsas Hollister)

Acerca de la irrigación

Puede que usted conozca a alguien que tenga una colostomía que diga que no usa una bolsa, o que usa una bolsa minúscula, cerrada, llamada tápa de estoma. Algunas personas usan un procedimiento llamado **irrigación** para controlar sus movimientos intestinales. Es como hacerse un enema a través del estoma, pero requiere un equipo y habilidades especiales.

Verifique con su médico o con su enfermera a cargo de su ostomía si desea saber más acerca de esto. La irrigación no es para todas las personas con colostomía. No obstante, si la irrigación de la colostomía es indicada en su caso, Hollister tiene los productos que necesita.



Cuidado periódico de su colostomía

Cuando su médico se lo aconseje, puede reasumir volver a sus actividades habituales. Se acostumbrará a su sistema de bolsa Hollister y establecerá un horario que se adapte a su estilo de vida. Encontrará a continuación algunas permas para el cuidado correcto de su colostomía.

- Vacíe la bolsa cuando el contenido sea entre un tercio y la mitad de su capacidad.
- Cambie la barrera cutánea, la parte encerada que se adhiere a su piel, cada tres a siete días.
- Si usa jabón, asegúrese de que no contenga aceites ni cremas que puedan interferir con los adhesivos.
- Enjuague su piel con agua y séquela completamente antes de colocar la nueva bolsa.
- Después de colocar su barrera cutánea, sosténgala contra su cuerpo durante 30 a 60 segundos. La presión y el calor ayudan a activar el adhesivo.
- Si usa un sistema de dos piezas, intente colocar su barrera cutánea en ángulo, formando un diamante, para un calce más suave.
- Puede ducharse o tomar un baño con su barrera cutánea y su bolsa colocadas, o puede retirarlas antes de bañarse. El agua no dañará ni correrá hacia dentro del estoma.
- Si su piel se pone roja y dolorida, o si su bolsa no se mantiene en el lugar, asegúrese de consultar a su médico o enfermera de ostomía.



Es realmente fácil con un sistema de dos piezas. Abra una y cierre otra.

— Jim Sinclair

Acerca del tiempo de uso

Varios factores afectarán el tiempo en que podrá usar su barrera cutánea y bolsa Hollister:

- tipo de drenaje de estoma – líquido, pastoso o más sólido
- cuánto sobresale el estoma de su piel
- el clima, su nivel de actividad y cuánto transpira
- la condición de la piel alrededor de su estoma
- pliegues, dobleces y arrugas en zonas alrededor de su estoma
- tipo de barrera cutánea utilizada – barreras Hollister SoftFlex, Flextend o FlexWear
- productos para la piel usados debajo de la barrera cutánea*

Generalmente, la barrera cutánea deberá cambiarse aproximadamente dos veces por semana, pero cada persona tiene su propia rutina. Si su tiempo de uso se convierte impredecible, consulte con la enfermera a cargo de su ostomía.

Planifique el cambio de su bolsa para un momento que sea adecuado para usted. No espere hasta que su bolsa comience a gotear o se despegue de su piel.

Si tiene problemas para que su barrera cutánea se quede en su lugar, deberá conseguir ayuda con el calce y la selección del producto. La mejor fuente de ayuda es una enfermera especializada en heridas, ostomías y continencia (Enfermera WOC/ET). Póngase en contacto con una de las enfermeras del nuestro personal a por el 1.800.323.4060.

*No use vendajes protectores cutáneos con gel, N° de producto 7917, debajo de las barreras cutáneas Flextend.



Me siento más libre con
New Image
— Jim Sinclair

Notas

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Los accesorios Hollister pueden añadir comodidad y resolver problemas



Es posible que haya veces en que necesite proteger su piel de los adhesivos o tratar una irritación cutánea leve. Quizá esté buscando la manera de reducir los olores o de mejorar el rendimiento de su sistema de bolsas. Consulte la tabla a continuación para saber de qué manera los productos accesorios Hollister podrán ayudarle a hacer su vida más fácil y más cómoda.

Si...	Entonces, use	Comentarios para el uso*
desea cerrar alrededor de la abertura de la barrera cutánea	pasta Adapt como un relleno para asegurar su barrera cutánea..	Esto no es un adhesivo. Si aplica demasiada pasta, podrá interferir con el buen sello de la bolsa.
desea rellenar una superficie dispareja o hay un espacio entre el estoma y la abertura de la barrera cutánea en su bolsa.	Anillos para barreras Adapt para proteger la piel, rellenar las zonas disparejas y proporcionar una alternativa a la pasta.	Los anillos podrán estirarse para adaptarse a estomas ovalados. Aplique sobre la piel limpia y seca o sobre la parte adhesiva de la barrera cutánea.
necesita agregar profundidad a su producto convexo o necesita convexidad flexible.	anillos para barreras convexas Adapt para crear una forma personalizada y mejorar el calce de sus productos.	Los anillos podrán estirarse para adaptarse a estomas ovalados. Aplique sobre la piel limpia y seca o sobre la parte adhesiva de la barrera cutánea.
desea llenar una superficie dispareja.	tiras para barreras Adapt para proteger la piel y rellenar las zonas disparejas.	Las tiras podrán cortarse para adaptarse a varias formas.



Si...	Entonces, use	Comentarios para el uso
su piel está ligeramente irritada** y húmeda.	polvo Premium para ayudarle a secar la piel húmeda.	Espolvoréa. Quite el exceso de polvo. Deje de usarlo cuando la piel se cure.
su piel es frágil y desea evitar halando la capa superior de la misma al retirar un adhesivo.	paños con gel para la piel, para ofrecer una cápa protectora a la piel.	Use sobre piel intacta. Deje secar completamente.
desea eliminar el olor cuando vacía o cambia su bolsa.	Adapt Lubricating Deodorant para eliminar el olor.	Add approximately 5 ml (1 tsp.) to pouch and rub evenly.
desea eliminar el olor cuando vacía o cambia su bolsa.	rociador m9 para eliminar el olor.	Rocíe en la habitación según sea necesario.
tiene una cantidad considerable de residuos de adhesivo en su piel o desea facilitar la remoción de un adhesivo.	paños de remoción universales para remover los residuos de adhesivo.	Normalmente no son necesarios en cada cambio de bolsa. Debería enjuagarse la piel con agua y jabón después de usarlos.
desea la seguridad adicional de un cinturón o su profesional de la salud se lo ha recomendado para mejorar la convexidad.	cinturones para ostomía para ayudar a asegurar la bolsa para ostomía.	Coloque las pestañas del cinturón hacia afuera del cuerpo. Deberá usarlo alineado con el estoma. Podrá usarse únicamente con una bolsa que tenga presillas para cinturón.

*Consulte el producto para obtener instrucciones de uso específicas.


** Consulte con su profesional de la salud por problemas cutáneos y de estomas.

Productos de dos piezas para colostomía Hollister

El sistema de dos piezas es el más versátil. Viene con una barrera cutánea que está separada de la bolsa. Las piezas se cierran a presión con un reborde, una pieza similar a un anillo de plástico. Es fácil dejar la barrera cutánea colocada en su piel, desprender la bolsa y desecharla tan a menudo como lo desee.

Sistema de combinación de colores

Para ayudarle a seleccionar piezas compatibles con New Image, la etiqueta de cada caja tiene un código de color. En primer lugar, seleccione la barrera cutánea adecuada, luego seleccione una bolsa con el código de color correspondiente (la etiqueta de la caja de la barrera cutánea “roja” es compatible con la etiqueta de la caja de la bolsa “roja”).

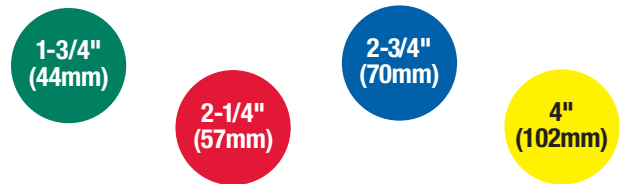

- Cómodo y flexible para estilos de vida activos.
- Hay barreras cutáneas disponibles con o sin cinta.
- Las bolsas New Image son compatibles únicamente con las barreras cutáneas New Image.



Sistema de bolsas de dos piezas New Image

Barreras cutáneas planas con rebordes flotantes



1460x (cortada a medida) Caja de 5
Barrera cutánea con cinta Flexend (uso extendido).

Nº de producto	Combinación de colores	Tamaño del reborde	Abertura de la barrera
14602	●	1-3/4" (44mm)	hasta 1-1/4" (32mm)
14603	●	2-1/4" (57mm)	hasta 1-3/4" (44mm)
14604	●	2-3/4" (70mm)	hasta 2-1/4" (57mm)
14606	●	4" (102mm)	hasta 3-1/2" (89mm)



1560x (cortada a medida) Caja de 5
Barrera cutánea sin cinta Flexend (uso extendido).

Nº de producto	Combinación de colores	Tamaño del reborde	Abertura de la barrera
15602	●	1-3/4" (44mm)	hasta 1-1/4" (32mm)
15603	●	2-1/4" (57mm)	hasta 1-3/4" (44mm)
15604	●	2-3/4" (70mm)	hasta 2-1/4" (57mm)



1420x (cortada a medida) Caja de 5
Barrera cutánea con cinta FlexWear (uso estándar).

Nº de producto	Combinación de colores	Tamaño del reborde	Abertura de la barrera
14202	●	1-3/4" (44mm)	hasta 1-1/4" (32mm)
14203	●	2-1/4" (57mm)	hasta 1-3/4" (44mm)
14204	●	2-3/4" (70mm)	hasta 2-1/4" (57mm)
14206	●	4" (102mm)	hasta 3-1/2" (89mm)



1520x (cortada a medida) Caja de 5
Barrera cutánea sin cinta FlexWear (uso estándar).

Nº de producto	Combinación de colores	Tamaño del reborde	Abertura de la barrera
15202	●	1-3/4" (44mm)	hasta 1-1/4" (32mm)
15203	●	2-1/4" (57mm)	hasta 1-3/4" (44mm)
15204	●	2-3/4" (70mm)	hasta 2-1/4" (57mm)



NUEVO

1470x (tamaño predefinido) Caja de 5
Barrera cutánea con cinta Flexend (uso extendido).

Nº de producto	Combinación de colores	Tamaño del reborde	Abertura de la barrera
14701	●	1-3/4" (44mm)	5/8" (16mm)
14702	●	1-3/4" (44mm)	3/4" (19mm)
14703	●	1-3/4" (44mm)	7/8" (22mm)
14704	●	1-3/4" (44mm)	1" (25mm)
14705	●	1-3/4" (44mm)	1-1/8" (29mm)
14706	●	1-3/4" (44mm)	1-1/4" (32mm)
14707	●	2-1/4" (57mm)	1-3/8" (35mm)
14708	●	2-1/4" (57mm)	1-1/2" (38mm)



NUEVO

1610x (tamaño predefinido)

Caja de 5

Barrera cutánea sin cinta Flexlend (uso extendido).

Nº de producto	Combinación de colores	Tamaño del reborde	Abertura de la barrera
16101	●	1-3/4" (44mm)	5/8" (16mm)
16102	●	1-3/4" (44mm)	3/4" (19mm)
16103	●	1-3/4" (44mm)	7/8" (22mm)
16104	●	1-3/4" (44mm)	1" (25mm)
16105	●	1-3/4" (44mm)	1-1/8" (29mm)
16106	●	1-3/4" (44mm)	1-1/4" (32mm)
16107	●	2-1/4" (57mm)	1-3/8" (35mm)
16108	●	2-1/4" (57mm)	1-1/2" (38mm)



NUEVO

1430x (tamaño predefinido)

Caja de 5

Barrera cutánea con cinta FlexWear (uso estándar)

Nº de producto	Combinación de colores	Tamaño del reborde	Abertura de la barrera
14301	●	1-3/4" (44mm)	5/8" (16mm)
14302	●	1-3/4" (44mm)	3/4" (19mm)
14303	●	1-3/4" (44mm)	7/8" (22mm)
14304	●	1-3/4" (44mm)	1" (25mm)
14305	●	1-3/4" (44mm)	1-1/8" (29mm)
14306	●	1-3/4" (44mm)	1-1/4" (32mm)
14307	●	2-1/4" (57mm)	1-3/8" (35mm)
14308	●	2-1/4" (57mm)	1-1/2" (38mm)



NUEVO

1640x (tamaño predefinido)

Caja de 5

Barrera cutánea sin cinta FlexWear (uso estándar)

Nº de producto	Combinación de colores	Tamaño del reborde	Abertura de la barrera
16401	●	1-3/4" (44mm)	5/8" (16mm)
16402	●	1-3/4" (44mm)	3/4" (19mm)
16403	●	1-3/4" (44mm)	7/8" (22mm)
16404	●	1-3/4" (44mm)	1" (25mm)
16405	●	1-3/4" (44mm)	1-1/8" (29mm)
16406	●	1-3/4" (44mm)	1-1/4" (32mm)
16407	●	2-1/4" (57mm)	1-3/8" (35mm)
16408	●	2-1/4" (57mm)	1-1/2" (38mm)

Barreras cutáneas convexas con rebordes flotantes



NUEVO

1480x (cortada a medida) Caja de 5
Barrera cutánea convexa con cinta Flexextend (uso extendido).

Nº de producto	Combinación de colores	Tamaño del reborde	Abertura de la barrera
14802	●	1-3/4" (44mm)	hasta 1" (25mm)
14803	●	2-1/4" (57mm)	hasta 1-1/2" (38mm)
14804	●	2-3/4" (70mm)	hasta 2" (51mm)



1580x (cortada a medida) Caja de 5
Barrera cutánea convexa sin cinta Flexextend (uso extendido).

Nº de producto	Combinación de colores	Tamaño del reborde	Abertura de la barrera
15802	●	1-3/4" (44mm)	hasta 1" (25mm)
15803	●	2-1/4" (57mm)	hasta 1-1/2" (38mm)
15804	●	2-3/4" (70mm)	hasta 2" (51mm)



NUEVO

1440x (cortada a medida) Caja de 5
Barrera cutánea convexa con cinta FlexWear (uso estándar).

Nº de producto	Combinación de colores	Tamaño del reborde	Abertura de la barrera
14402	●	1-3/4" (44mm)	hasta 1" (25mm)
14403	●	2-1/4" (57mm)	hasta 1-1/2" (38mm)
14404	●	2-3/4" (70mm)	hasta 2" (51mm)



1540x (cortada a medida) Caja de 5
Barrera cutánea convexa sin cinta FlexWear (uso estándar).

Nº de producto	Combinación de colores	Tamaño del reborde	Abertura de la barrera
15402	●	1-3/4" (44mm)	hasta 1" (25mm)
15403	●	2-1/4" (57mm)	hasta 1-1/2" (38mm)
15404	●	2-3/4" (70mm)	hasta 2" (51mm)



NUEVO

1490x (tamaño predefinido) Caja de 5
Barrera cutánea convexa con cinta Flexextend (uso extendido).

Nº de producto	Combinación de colores	Tamaño del reborde	Abertura de la barrera
14903	●	1-3/4" (44mm)	7/8" (22mm)
14904	●	1-3/4" (44mm)	1" (25mm)
14905	●	2-1/4" (57mm)	1-1/8" (29mm)
14906	●	2-1/4" (57mm)	1-1/4" (32mm)



1590x (tamaño predefinido) Caja de 5
Barrera cutánea convexa sin cinta Flexend (uso extendido).

Nº de producto	Combinación de colores	Tamaño del reborde	Abertura de la barrera
15903	●	1-3/4" (44mm)	7/8" (22mm)
15904	●	1-3/4" (44mm)	1" (25mm)
15905	●	2-1/4" (57mm)	1-1/8" (29mm)
15906	●	2-1/4" (57mm)	1-1/4" (32mm)



NUEVO

1450x (tamaño predefinido) Caja de 5
Barrera cutánea convexa con cinta FlexWear (uso estándar).

Nº de producto	Combinación de colores	Tamaño del reborde	Abertura de la barrera
14503	●	1-3/4" (44mm)	7/8" (22mm)
14504	●	1-3/4" (44mm)	1" (25mm)
14505	●	2-1/4" (57mm)	1-1/8" (29mm)
14506	●	2-1/4" (57mm)	1-1/4" (32mm)



1550x (tamaño predefinido) Caja de 5
Barrera cutánea convexa sin cinta FlexWear (uso estándar)

Nº de producto	Combinación de colores	Tamaño del reborde	Abertura de la barrera
15503	●	1-3/4" (44mm)	7/8" (22mm)
15504	●	1-3/4" (44mm)	1" (25mm)
15505	●	2-1/4" (57mm)	1-1/8" (29mm)
15506	●	2-1/4" (57mm)	1-1/4" (32mm)

Bolsas drenables



1818x/1819x Caja de 10
Bolsa drenable con filtro incorporado y sistema de cierre Lock n' Roll (Cierre y enrollado), transparente o beige; bolsa silenciosa y con barrera para el olor con revestimiento(s) ComfortWear.

Nº de producto transparente	Nº de producto beige	Combinación de colores	Tamaño del reborde	Largo de la bolsa
18192	18182	●	1-3/4" (44mm)	12" (30cm)
18193	18183	●	2-1/4" (57mm)	12" (30cm)
18194	18184	●	2-3/4" (70mm)	12" (30cm)



1828x/1829x

Caja de 10

Bolsa pequeña con filtro incorporado y sistema de cierre Lock n' Roll (Cierre y enrollle), transparente o beige; bolsa silenciosa y con barrera para el olor con revestimiento(s) ComfortWear

Nº de producto transparente	Nº de producto beige	Combinación de colores	Tamaño del reborde	Largo de la bolsa
18292	18282	●	1-3/4" (44mm)	7" (18cm)
18293	18283	●	2-1/4" (57mm)	7" (18cm)
18294	18284	●	2-3/4" (70mm)	7" (18cm)



1811x/1813x

Caja de 10

Bolsa drenable con sistema de cierre Lock n' Roll (Cierre y enrollle), transparente o beige; bolsa silenciosa y con barrera para el olor con revestimiento(s) ComfortWear.

Nº de producto transparente	Nº de producto beige	Combinación de colores	Tamaño del reborde	Largo de la bolsa
18132	18112	●	1-3/4" (44mm)	12" (30cm)
18133	18113	●	2-1/4" (57mm)	12" (30cm)
18134	18114	●	2-3/4" (70mm)	12" (30cm)

NUEVO

1800x

Caja de 10

Bolsa drenable con sistema de cierre Lock n' Roll (Cierre y enrollle), ultra transparente, con barrera para el olor y revestimientos laterales ComfortWear.

Nº de producto ultra transparente	Combinación de colores	Tamaño del reborde	Largo de la bolsa
18003	●	2-1/4" (57mm)	12" (30cm)
18004	●	2-3/4" (70mm)	12" (30cm)
18006	●	4" (102mm)	12" (30cm)



1814x/1816x

Caja de 10

Bolsa drenable con filtro incorporado, transparente o beige; bolsa silenciosa y con barrera para el olor con revestimiento(s) ComfortWear.

Nº de producto transparente	Nº de producto beige	Combinación de colores	Tamaño del reborde	Largo de la bolsa
18162	18142	●	1-3/4" (44mm)	12" (30cm)
18163	18143	●	2-1/4" (57mm)	12" (30cm)
18164	18144	●	2-3/4" (70mm)	12" (30cm)

NUEVO

1817x

Caja de 10

Bolsa drenable, ultra transparente, con barrera para el olor y revestimientos laterales ComfortWear.

Nº de producto ultra transparente	Combinación de colores	Tamaño del reborde	Largo de la bolsa
18173	●	2-1/4" (57mm)	12" (30cm)
18174	●	2-3/4" (70mm)	12" (30cm)
18176	●	4" (102mm)	12" (30cm)

1810x/1812x

Caja de 10

Bolsa drenable, transparente o beige; bolsa silenciosa y con barrera para el olor con revestimiento(s) ComfortWear.

Nº de producto transparente	Nº de producto beige	Combinación de colores	Tamaño del reborde	Largo de la bolsa
18102	18122	●	1-3/4" (44mm)	12" (30cm)
18103	18123	●	2-1/4" (57mm)	12" (30cm)
18104	18124	●	2-3/4" (70mm)	12" (30cm)

1820x

Caja de 10

Bolsa pequeña, beige; bolsa silenciosa y con barrera para el olor con revestimiento ComfortWear en ambos lados.

Nº de producto	Combinación de colores	Tamaño del reborde	Largo de la bolsa
18202	●	1-3/4" (44mm)	9" (23cm)
18203	●	2-1/4" (57mm)	9" (23cm)
18204	●	2-3/4" (70mm)	9" (23cm)

¡Próximamente!

New Image High Output Drainable Pouch

1801x

Caja de 10

Bolsa drenable, ultra transparente, con barrera para el olor y revestimientos laterales ComfortWear.

Nº de producto ultra transparente	Combinación de colores	Tamaño del reborde	Largo de la bolsa
18012	●	1-3/4" (44mm)	12" (30cm)
18013	●	2-1/4" (57mm)	12" (30cm)
18014	●	2-3/4" (70mm)	12" (30cm)
18016	●	4" (102mm)	12" (30cm)



New Image Closed Pouches

1836x/1837x

Caja de 60

Bolsa cerrada con filtro incorporado, transparente o beige; bolsa silenciosa y con barrera para el olor con revestimiento(s) ComfortWear.

Nº de producto transparente	Nº de producto beige	Combinación de colores	Tamaño del reborde	Largo de la bolsa
18362	18372	●	1-3/4" (44mm)	9" (23cm)
18363	18373	●	2-1/4" (57mm)	9" (23cm)
18364	18374	●	2-3/4" (70mm)	9" (23cm)



1838x/1839x

Caja de 60

Bolsa cerrada pequeña con filtro incorporado, transparente o beige; b bolsa silenciosa y con barrera para el olor con revestimiento(s) ComfortWear.

Nº de producto transparente	Nº de producto beige	Combinación de colores	Tamaño del reborde	Largo de la bolsa
18382	18392	●	1-3/4" (44mm)	7" (18cm)
18383	18393	●	2-1/4" (57mm)	7" (18cm)
18384	18394	●	2-3/4" (70mm)	7" (18cm)



Funda de irrigador

1815x

Caja de 5

Funda de irrigador

Nº de producto	Combinación de colores	Tamaño del reborde	Largo de la bolsa
18152	●	1-3/4" (44mm)	30" (76cm)
18153	●	2-1/4" (57mm)	30" (76cm)
18154	●	2-3/4" (70mm)	30" (76cm)

Productos de una pieza para colostomía Hollister

En un sistema de una pieza, la barrera cutánea y la cinta ya están unidas a la bolsa. Esto significa que la bolsa es fácil de colocar. Simplemente pelar y pegar.

- Barreras cutáneas Flexlend.
- Opción de convexidad cortada a medida.
- Revestimientos ComfortWear.
- Cinta de tela beige porosa.
- Cierre Lock n' Roll (Cierre y enrollle) disponible.

Sistema de bolsa de una pieza Premier



NUEVO

NUEVO

Bolsas drenables con barreras planas

8531 (cortada a medida) Caja de 10
Bolsa drenable con sistema de cierre Lock n' Roll (Cierre y enrollle), bolsa ultra transparente con barrera para el olor y con barrera cutánea Flexlend (uso extendido) con cinta y revestimientos laterales ComfortWear.

Nº de producto	Color de la bolsa	Abertura de la barrera	Largo de la bolsa
8531	Ultra transparente	hasta 2-1/2" (64mm)	12" (30cm)

8551 (cortada a medida) Caja de 10
Bolsa drenable con sistema de cierre Lock n' Roll (Cierre y enrollle), bolsa beige silenciosa, con barrera para el olor y con barrera cutánea Flexlend (uso extendido) con cinta y revestimientos laterales ComfortWear en ambos lados.

Nº de producto	Color de la bolsa	Abertura de la barrera	Largo de la bolsa
8551	Beige	hasta 2-1/2" (64mm)	12" (30cm)



8631 (cortada a medida) Caja de 10
Bolsa drenable, bolsa beige silenciosa, con barrera para el olor y con barrera cutánea FlexTend (uso extendido) con cinta y revestimientos laterales ComfortWear.

Nº de producto	Color de la bolsa	Abertura de la barrera	Largo de la bolsa
8631	Beige	hasta 2-1/2" (64mm)	12" (30cm)



8641 (cortada a medida) Caja de 10
Bolsa pequeña, transparente, silenciosa, con barrera para el olor y con barrera cutánea FlexTend (uso extendido) con cinta y revestimiento lateral ComfortWear.

Nº de producto	Color de la bolsa	Abertura de la barrera	Largo de la bolsa
8641	Transparent	hasta 2-1/2" (64mm)	9" (23cm)



NUEVO

88300/88400 (cortada a medida) Caja de 10
Bolsa drenable con filtro incorporado y sistema de cierre Lock n' Roll (Cierre y enrollle), transparente o beige; bolsa silenciosa, con barrera para el olor y con barrera cutánea SoftFlex (uso estándar) y revestimiento(s) ComfortWear.

Nº de producto transparente	Color de la bolsa beige	Abertura de la barrera	Largo de la bolsa
88400	88300	5/8"-2 1/8" (15-55 mm)	11" (29cm)



NUEVO

88800/88700 (cortada a medida) Caja de 20
Bolsa drenable pequeña con filtro incorporado y sistema de cierre Lock n' Roll (Cierre y enrollle), transparente or beige: bolsa silenciosa, con barrera para el olor y con barrera cutánea SoftFlex (uso estándar) con cinta y revestimiento(s) ComfortWear.

Nº de producto transparente	Color de la bolsa beige	Abertura de la barrera	Largo de la bolsa
88800	88700	hasta 2-1/8" (55mm)	7" (18cm)



NUEVO

883xx/884xx (tamaño predefinido) Caja de 10
Bolsa drenable con filtro incorporado y sistema de cierre Lock n' Roll (Trabe y enrollle), transparente o beige; bolsa silenciosa, con barrera para el olor y con barrera cutánea SoftFlex (uso estándar) y revestimiento(s) ComfortWear.

Nº de producto transparente	Color de la bolsa beige	Abertura de la barrera	Largo de la bolsa
88425	88325	1" (25mm)	12" (30cm)
88430	88330	1-3/16" (30mm)	12" (30cm)
88435	88335	1-3/8" (35mm)	12" (30cm)
88440	88340	1-9/16" (40mm)	12" (30cm)



888xx/887xx (tamaño predefinido)

Caja de 20

Bolsa drenable pequeña con filtro incorporado y sistema de cierre Lock n' Roll (Trabe y enrollle), transparente or beige: bolsa silenciosa, con barrera para el olor y con barrera cutánea SoftFlex (uso estándar) sin cinta y revestimiento(s) ComfortWear.

Nº de producto transparente	Color de la bolsa beige	Abertura de la barrera	Largo de la bolsa
88825	88725	1" (25mm)	7" (18cm)
88830	88730	1-3/16" (30mm)	7" (18cm)
88835	88735	1-3/8" (35mm)	7" (18cm)
88840	88740	1-9/16" (40mm)	7" (18cm)



853x/855x (tamaño predefinido)

Caja de 10

Bolsa drenable con sistema de cierre Lock n' Roll (Cierre y enrollle), bolsa transparente silenciosa, con barrera para el olor y con barrera cutánea Flexend (uso extendido) con cintay revestimientos laterales ComfortWear.

Nº de producto transparente	Nº de producto beige	Abertura de la barrera	Largo de la bolsa
8532	8552	1" (25mm)	12" (30cm)
8538	8558	1-1/4" (32mm)	12" (30cm)
8533	8553	1-1/2" (38mm)	12" (30cm)
8539	8559	1-3/4" (44mm)	12" (30cm)



863x (tamaño predefinido)

Caja de 10

Bolsa drenable, bolsa beige silenciosa, con barrera para el olor y con barrera cutánea Flexend (uso extendido) con cinta y revestimientos laterals ComfortWear.

Nº de producto	Color de la bolsa	Abertura de la barrera	Largo de la bolsa
8637	Beige	3/4" (19mm)	12" (30cm)
8632	Beige	1" (25mm)	12" (30cm)
8638	Beige	1-1/4" (32mm)	12" (30cm)
8633	Beige	1-1/2" (38mm)	12" (30cm)
8639	Beige	1-3/4" (49mm)	12" (30cm)
8634	Beige	2" (51mm)	12" (30cm)
8635	Beige	2-1/2" (51mm)	12" (30cm)



864x (tamaño predefinido) Caja de 10
Bolsa pequeña, beige, silenciosa, con barrera para el olor y con barrera cutánea FlexTend (uso extendido) con cinta y revestimiento lateral ComfortWear en ambos lados.

Nº de producto	Color de la bolsa	Abertura de la barrera	Largo de la bolsa
8647	Beige	3/4" (19mm)	9" (23cm)
8642	Beige	1" (25mm)	9" (23cm)
8648	Beige	1-1/4" (32mm)	9" (23cm)
8643	Beige	1-1/2" (38mm)	9" (23cm)
8649	Beige	1-3/4" (49mm)	9" (23cm)
8644	Beige	2" (51mm)	9" (23cm)

Bolsas drenables con barreras convexas

852x/850x (cortada a medida) Caja de 5
Bolsa drenable con sistema de cierre Lock n' Roll (Cierre y enrollado), bolsa transparente o beige silenciosa, con barrera para el olor y con barrera cutánea FlexTend (uso extendido) con cinta y revestimiento lateral ComfortWear.

Nº de producto transparente	Color de la bolsa beige	Abertura de la barrera	Largo de la bolsa
8524	8504	hasta 1" (25mm)	12" (30cm)
8528	8508	hasta 1-1/2" (38mm)	12" (30cm)
85211	85011	hasta 2" (51mm)	12" (30cm)

851x/859x (cortada a medida) Caja de 5
Bolsa drenable con sistema de cierre Lock n' Roll (Cierre y enrollado), bolsa transparente o beige silenciosa, con barrera para el olor y con barrera cutánea FlexTend (uso extendido) con cinta y revestimientos laterales ComfortWear.

Nº de producto transparente	Color de la bolsa beige	Abertura de la barrera	Largo de la bolsa
8510	8590	3/4" (19mm)	12" (30cm)
8511	8591	7/8" (22mm)	12" (30cm)
8512	8592	1" (25mm)	12" (30cm)
8513	8593	1-1/8" (29mm)	12" (30cm)
8514	8594	1-1/4" (32mm)	12" (30cm)
8515	8595	1-3/8" (35mm)	12" (30cm)





862x (cortada a medida) Caja de 5
Bolsa drenable, transparente, silenciosa, con barrera para el olor y con barrera cutánea Flexend (uso extendido) con cinta y revestimiento lateral ComfortWear.

Nº de producto	Color de la bolsa	Abertura de la barrera	Largo de la bolsa
8624	Transparent	hasta 1" (25mm)	12" (30cm)
8628	Transparent	hasta 1-1/2" (38mm)	12" (30cm)
86211	Transparent	hasta 2" (51mm)	12" (30cm)



861x (tamaño predefinido) Caja de 5
Bolsa drenable, transparente, silenciosa, con barrera para el olor y con barrera cutánea Flexend (uso extendido) con cinta y revestimiento lateral ComfortWear.

Nº de producto	Color de la bolsa	Abertura de la barrera	Largo de la bolsa
8610	Transparent	3/4" (19mm)	12" (30cm)
8611	Transparent	7/8" (22mm)	12" (30cm)
8612	Transparent	1" (25mm)	12" (30cm)
8613	Transparent	1-1/8" (29mm)	12" (30cm)
8614	Transparent	1-1/4" (32mm)	12" (30cm)
8615	Transparent	1-3/8" (35mm)	12" (30cm)
8616	Transparent	1-1/2" (38mm)	12" (30cm)
8617	Transparent	1-5/8" (41mm)	12" (30cm)
8618	Transparent	1-3/4" (44mm)	12" (30cm)
8619	Transparent	2" (51mm)	12" (30cm)



NUEVO

Bolsas cerradas Premier

82300/82400 (cortada a medida)

Caja de 30

Bolsa cerrada con filtro incorporado, transparente o beige; bolsa silenciosa, con barrera para el olor y con barrera cutánea SoftFlex con revestimiento(s) ComfortWear.

Nº de producto transparente	Color de la bolsa	Abertura de la barrera beige	Largo de la bolsa
82400	82300	5/8"-2 1/8" (15-55 mm)	9" (23cm)



NUEVO

823xx (tamaño predefinido)

Caja de 30

Bolsa cerrada con filtro incorporado, beige; bolsa silenciosa, con barrera para el olor y con barrera cutánea SoftFlex (uso estándar) con revestimiento ComfortWear en ambos lados.

Nº de producto	Color de la bolsa	Abertura de la barrera	Largo de la bolsa
82325	Beige	1" (25mm)	9"(23cm)
82330	Beige	1-3/16" (30mm)	9"(23cm)
82335	Beige	1-3/8" (35mm)	9"(23cm)



NUEVO

82100/82500 (cortada a medida)

Caja de 30

Bolsa cerrada pequeña con filtro incorporado, transparente o beige; bolsa silenciosa, con barrera para el olor y con barrera cutánea SoftFlex (uso estándar) con revestimiento(s) ComfortWear.

Nº de producto transparente	Color de la bolsa beige	Abertura de la barrera	Largo de la bolsa
82500	82100	5/8"-2 1/8" (15-55 mm)	7" (18cm)



NUEVO

821xx (tamaño predefinido)

Caja de 30

Bolsa cerrada pequeña con filtro incorporado, beige; bolsa silenciosa, con barrera para el olor y con barrera cutánea SoftFlex (uso estándar) con revestimiento ComfortWear en ambos lados.

Nº de producto	Color de la bolsa	Abertura de la barrera	Largo de la bolsa
82125	Beige	1" (25mm)	7" (18cm)
82130	Beige	1-3/16" (30mm)	7" (18cm)
82135	Beige	1-3/8" (35mm)	7" (18cm)

Productos accesorios Hollister



Accesorios Adapt

780x Caja de 10
Anillos para barreras Adapt

Nº de producto	Diámetro interno
7805	13/16" (20mm)
7806	1-3/16" (30mm)
7807	1-9/16" (40mm)
7808	1-15/16" (50mm)

795xx Caja de 10
Anillos para barreras convexas Adapt.

Nº de producto	Diámetro interno
79520	13/16" (20mm) puede estirar se hasta 1"(25mm)
79530	1-3/16" (30mm) puede estirar se hasta 1-3/8"(35mm)
79540	1-9/16" (40mm) puede estirar se hasta 1-3/4"(45mm)

79400 Caja de 10
Tiras para barreras Adapt.

Nº de producto	Tamaño	Largo
79400	60 grams	5-1/8" (13cm)

79300/79301
Pasta Adapt.

Nº de producto	Descripción	Cantidad
79300	2 oz. (57 grams) tubo	Caja de 1
79301	0.5oz (14 grams) tubo	Caja de 20

NUEVO



Polvo

7906 Caja de 1

Polvo Premium

Nº de producto	Descripción
7906	Frasco para espolvorear de 1 oz. (30 ml)



8800/8801

Nº de producto	Tamaño	Cantidad
8800	4" x 4" (10cm x 10cm)	Caja de 5
8801	8" x 8" (20cm x 20cm)	Caja de 3



Productos en gel para la piel

7917 12 cajas de 50 paños cada una

Pañosde Gel Protectores

Nº de producto
7917



Adhesivos y removedores

7760 12 cajas de 50 paños cada una

Paños removedores universales para adhesivos y barreras.

Nº de producto
7760



7730 Caja de 4

Adhesivo médico. Mejora el contacto del adhesivo entre la piel y la barrera.

Nº de producto	Descripción
7730	3.2 oz. (95ml) lata roceadora

7731 Caja de 4

Removedores adhesivo médico

Nº de producto	Descripción
7731	2.7 oz. (76 g) spray can



NUEVO

Desodorante lubricante Adapt

78500/78501

Desodorante lubricante Adapt

Nº de producto	Descripción	Cantidad
78500	8 oz. (236ml) frasco	1 caja
78501	0.27 oz. (8ml) sobre	50 sobres/caja



773x

Rocío eliminador de olor m9

Nº de producto	Descripción	Cantidad
(sin fragancia)		
7732	2 oz. (60ml) pump spray	Caja de 12
7733	8 oz. (240ml) pump spray	Caja de 6

(con fragancia)

7734	2 oz. (60ml) pump spray	Caja de 12
7735	8 oz. (240ml) pump spray	Caja de 6



Cinturones para ostomía

7300/7299

Cinturones para ostomía.

Caja de 10

Nº de producto	Tamaño
7300	26"-43" (66-109cm) Mediano
7299	29"-49" (74-124cm) Grande



8770

Pinza para bolsas drenable. Para usar con todas las bolsas Hollister.

Caja de 20

Nº de producto	Color
8770	Beige



Productos para irrigación

7721

Caja de 1

El Kit de cono irrigador incluye:
 (1) Irrigador
 (1) Cono de estoma con conector
 (1) Cepillo limpiador

Nº de
producto

7721

7728/7724

Caja de 10

Funda de irrigador con presillas para cinturón

Nº de producto	Abertura/Tamaño	Largo
7728	2" (51mm)	30" (76cm)
7724	3" (76mm)	30" (76cm)

Eliminadores de olor

771x

Gotas eliminadoras de olor m9

Nº de producto	Descripción	Cantidad
7715	1 oz. (30ml) frascode	Caja de 12
7717	8 oz. (240ml) frascode	Caja de 6

Glosario

Bolsa cerrada	Una bolsa sin una abertura o una pinza. Se desecha rápida y fácilmente. Debe quitarse para ser vaciada.
Colostomía	Una ostomía (abertura quirúrgica) creada en el colon, parte del intestino grueso.
Revestimientos (para bolsa) ComfortWear	Los revestimientos (para bolsa) ComfortWear tienen una suave tela entre la bolsa y la piel.
Barrera cutánea convexa	Se usa cuando el estoma no sobresale del abdomen. La barrera cutánea está moldeada para presionar con más profundidad alrededor del estoma.
Bolsa drenable	Una bolsa con una abertura en la parte inferior. Se usa una pinza para mantener la bolsa cerrada hasta que sea el momento de vaciarla.
Filtro	Deja salir el gas pero no el olor.
Reborde	El anillo de plástico en un sistema de ostomía de dos piezas que se usa para conectar las dos piezas.
Barreras cutáneas planas	Se usan cuando el estoma sobresale del abdomen.
Barrera cutánea Flexlend	Flexlend es una barrera cutánea sintética que está diseñada para ser más resistente a las descargas.
Barrera cutánea FlexWear	FlexWear es una barrera cutánea sintética que está diseñada para usarse más de un día. La barrera FlexWear es más resistente a las roturas que la barrera SoftFlex.
Reborde flotante	Puede colocar sus dedos debajo del reborde como sostén mientras une la bolsa a la barrera.
Irrigación	Un procedimiento utilizado para controlar los movimientos intestinales. No es para todas las personas con colostomía, y requiere un equipo y habilidades especiales.
Bolsa con barrera para el olor	La bolsa con barrera para el olor es altamente resistente, no permitiendo que los olores pasen a través de la bolsa. La calidad de barrera para el olor aumenta la seguridad al usar una bolsa.
Barrera cutánea SoftFlex	SoftFlex es una barrera cutánea sintética, que proporciona una adhesión suave a la piel. Está diseñada para limitar el daño a la piel al ser retirada con frecuencia, y puede cambiarla a diario (o más seguido).
Estoma	El lugar de donde sale el drenaje de su cuerpo cuando tiene una ostomía. El estoma está hecho de intestino, es rosado y húmedo y no tiene sensibilidad.
Tiempo de uso	El tiempo de uso es la cantidad de tiempo que un producto puede ser usado antes de fallar. El tiempo de uso varía ampliamente en base a una variedad de factores.

Organizaciones que proporcionan información

Para más información y para solicitar un catálogo gratuito, póngase en contacto con Hollister Incorporated.

Hollister Incorporated

2000 Hollister Drive
Libertyville, Illinois 60048
1.800.323.4060
www.hollister.com

Wound, Ostomy, and Continence Nurses Society (WOCN)

1.888.224.WOCN (llamada gratuita)
1.866.615.8560
www.wocn.org

American Cancer Society (ACS)

1599 Clifton Road NE
Atlanta, GA 30329
1.800.ACS.2345
www.cancer.org

Crohn's & Colitis Foundation of America, Inc. (CCFA)

National Headquarters
386 Park Avenue South, 17th floor
New York, NY 10016-8804
1.800.932.2423
www.ccfa.org

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Notes

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Red de apoyo Hollister

Red de apoyo Hollister
Hollister ofrece una red de apoyo para responder a todas sus preguntas y guiarlo hacia la mejor solución para ostomías..

Hable con un experto

Las enfermeras especializadas en ostomía que forman parte de nuestro personal pueden responder a sus preguntas.

Nuestro Centro de Servicio al Cliente tiene un equipo de representantes con experiencia para asistirlo con la selección de su producto.

También contamos con una amplia variedad de material educativo.

Equipo y boletín informativo Comienzo seguro

Nuestro **Equipo Comienzo Seguro** le ofrece muestras gratis de productos con instrucciones, tijeras, un espejo y un práctico estuche de viaje.

El **boletín informativo Comienzo Seguro**, disponible trimestralmente, destaca nuevos productos y accesorios de Hollister, proporciona información sobre la ostomía y lo actualiza sobre reembolsos.

Toda esta información está disponible a través de nuestro sitio web, **www.hollister.com** o por teléfono llamando al **1.800.323.4060**.



Hollister Incorporated
2000 Hollister Drive
Libertyville, Illinois 60048
1.800.323.4060

Hollister Limited
95 Mary Street
Aurora, Ontario L4G 1G3
1.800.263.7400

www.hollister.com

Hollister y el logotipo, Hollister, Adapt, ComfortWear, FirstChoice, FlexTend, FlexWear, Lock'n Roll, m9, New Image, Premier, Secure Start, y SoftFlex son marcas registradas de Hollister Incorporated.

©2005 Hollister Incorporated.
Reservados todos los derechos.
Impreso en los EE.UU. 907242-605