

Anchor Fast

Sujetador para Tubo Endotraqueal Oral



Facilita:

- Apego a la GPC vigente¹.
- Protocolos de cuidado rutinario.
- Protocolos de extubación.

Menos riesgo de:

- Neumonía Asociada a Ventilación Mecánica
- Ulceras por Presión Labiales²
- Extubación Inadvertida³

Puntos para Recordar:

1. Elegir **Anchor Fast** para el paciente adecuado.
2. Leer el Instructivo de Uso de **Anchor Fast**.
3. Higiene de manos previo a la colocación.
4. Eliminar el exceso de humedad y residuos grasos de las mejillas del paciente. Basta con una gasa seca.
5. La bigotera de **Anchor Fast** apenas debe de tocar el labio superior del paciente.
6. Al colocar las mejilleras, presionar durante 30 segundos para mejorar la adhesión.
7. Ajustar la banda del cuello sin exceso de presión.
8. Retirar el exceso de humedad y residuos del TE.
9. Deslizar el estabilizador por encima del TE..
10. Abrazar el TE con la cinta autoadherible y cerrar la pinza. ¡**CLICK!**
11. Hacer uso adecuado de los brazos del sistema de ventilación para liberar de carga excesiva a **Anchor Fast**.
12. Apegarse a la normatividad vigente para el cuidado del paciente con intubación orotraqueal con la finalidad de prevenir Neumonías Asociadas a Ventilación Mecánica.

1. GPC Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Neumonía Asociada a Ventilación Mecánica. IMSS -624-13
2. Veneman W. Comunicación Interna. Hollister Inc.
3. Miller K. Comunicación Interna. Hollister Inc.